

READY-HEAT™

ANWENDUNG

1. Verpackung erst unmittelbar vor der Anwendung öffnen.
 2. Nehmen Sie das Ready-Heat™ Produkt aus der Verpackung und entfalten Sie dieses.
 3. Ready-Heat™ Weste: Die Weste über den Kopf am Körper platzieren, mit den zwei kleinen Elementen vorne. Mit den Bändern an den Körper anpassen.
 4. Die Wärmeelemente benötigen 10-15 Minuten zur vollen Leistungsentfaltung.
 5. Bei nachlassender Wärmeleistung, Decke zum Belüften der Elemente schütteln.
 6. Enthält keine umweltschädlichen Stoffe, dadurch einfache Entsorgung nach Gebrauch.
-

WARNHINWEISE

- > Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- > Sorgsame Anwendung an älteren Personen, Säuglingen, Kindern, Personen mit sensibler Haut oder Personen mit eingeschränktem oder fehlendem Wärmeempfinden.
- > Personen mit Allergien, Diabetes, Frostschäden, Narben, offenen Wunden oder Durchblutungsstörungen sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie Ready Heat™ verwenden.
- > Entfernen Sie die Decke, falls sie zu heiß wird oder Sie sich unwohl fühlen. Maximale Temperatur: 52° C (außer Babykokon - dieser erreicht max. 46°C). Nicht während des Schlafens verwenden. Nicht auf nackter Haut anwenden.
- > Öffnen oder beschädigen Sie die Wärmeelemente nicht! Bei Kontakt der Inhaltsstoffe mit Augen und/oder Schleimhäuten sofort mit klarem Wasser spülen. Bei irrtümlicher Einnahme kontaktieren Sie eine Vergiftungszentrale.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verbrennung oder anderweitigen schweren Körperverletzungen führen.