
DIE AM HÄUFIGSTEN AUFTRETENDEN FRAGEN

FAQ CM TRAUMAMATTRESS™

WARUM SOLLTE IM SCHOCKRAUM EINE CM TRAUMAMATTRESS™ BENUTZT WERDEN?

> Durch die TraumaMattress™ wird der Aufwand des Umlagerens auf ein Minimum reduziert, gleichzeitig werden Patientensicherheit und -komfort erhöht, sowie ein durchgängiger Wärmeerhalt gewährleistet. Das einfache Handling entlastet das Personal körperlich. Insgesamt kann außerdem der Durchsatz im Schockraum erhöht werden, d.h. der Schockraum steht noch schneller für weitere Patienten zur Verfügung, während der erste Patient weiterhin auf der CM TraumaMattress™ bleibt.

KÖNNEN PATIENTEN MIT DER CM TRAUMAMATTRESS™ GETRAGEN WERDEN?

> Nein, die CM TraumaMattress™ ist zum Ziehen auf ebenem Untergrund bzw. zum Überbrücken von geringen Höhenunterschieden gedacht. Eine Verwendung wie eine Trage ist nicht vorgesehen. Dennoch ist die CM TraumaMattress™ mit 150 kg Hebelbelastung getestet.

WIE HOCH IST DIE GEWICHTSBEGRENZUNG?

> Die TraumaMattress™ unterliegt keiner eigentlichen Gewichtsbeschränkung; ihr Einsatzbereich wird durch den Patientenumfang, z.B. bei besonders adipösen Patienten, limitiert. Eine Gewichtsbeschränkung existiert auch insofern nicht, als die CM TraumaMattress™ nicht zum Tragen konzipiert wurde.

KANN ICH EIN ROLLBOARD ZUR UMLAGERUNG BENUTZEN?

> Ein Rollboard wird aufgrund der Beschichtung nicht empfohlen. Dadurch kann die TraumaMattress™ beschädigt werden. Es wird das CM ProSlide™ empfohlen.

WIE LANGE KANN DER PATIENT AUF DER MATRATZE LIEGEN?

> Durch die druckentlastende Spezialpolsterung stellt auch eine längere Liegedauer für Patienten in der Regel kein Problem dar. Entsprechend lokaler Vorgaben, jedoch wenigstens alle zwei Stunden, sollten Patienten, die auf der CM TraumaMattress™ liegen, auf Druckstellen untersucht werden.

KANN DIE CM TRAUMAMATTRESS™ IN CT UND RÖNTGEN VERWENDET WERDEN?

> Ja, die CM TraumaMattress™ ist aus röntgendurchlässigem Material und verursacht keinerlei Artefakte.

MÜSSEN DIE CM COVER VERWENDET WERDEN?

> Die TraumaMattress™ und die CM Cover stellen zusammen eine Einheit dar. Von einer einzelnen Benutzung der TraumaMattress ohne CM Cover wird grundsätzlich abgeraten. Die CM Cover schonen die Matratze und verhindern frühzeitigen Verschleiß und Beschädigungen. Gleichzeitig schützen sie den Patienten vor Temperaturverlust, sind stark saugend und bereiten ein angenehmes weiches, fast behagliches Gefühl.

KANN DIE TRAUMAMATTRESS™ AUCH AM KOPF- ODER FUSSTEIL GEHOBBEN WERDEN?

> Nein, das Bewegen der CM TraumaMattress™ sollte nur an den dafür vorgesehenen Griffen erfolgen.