

---

# DIE AM HÄUFIGSTEN AUFTRETENDEN FRAGEN

## FAQ QINFLOW (QIF™) WARRIOR

---

### WOZU DIENT DER QINFLOW WARRIOR?

- > Um Infusionen oder Blutkonserven, welche dann dem Patienten zugeführt werden sollen, dauerhaft und in schnellstmöglicher Zeit zu erwärmen.

---

### IST DER QINFLOW TRANSPORTABEL?

- > Ja, der QinFlow ist transportabel. Er kann unter anderem mittels wiederaufladbarem Akku betrieben werden. Der QinFlow Warrior ist nur 1,65 kg leicht, tragbar und wird mit einer eigenen Halterung an einer Perfusorleiste oder direkt an einer Patiententrage fixiert.

---

### WIE FUNKTIONIERT DER QINFLOW?

- > Die Einwegeinheit wird zwischen dem Gefäßzugang und dem Infusionsablaufgerät angeschlossen. Anschließend werden Infusionslösungen, Blut und Blutprodukte mit einer maximalen Durchflussrate von 200 ml/min schonend auf 38°C (+/- 2°C) erwärmt.

---

### WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

- > Mit einer vollen Akkuladung erwärmt der QinFlow Warrior bis zu fünf Liter Flüssigkeit (Eingangstemperatur 20 °C, Durchflussrate von 150 ml/min.).

---

### KÖNNEN MIT DEM QINFLOW WARRIOR AUCH BLUTPRODUKTE ERWÄRMT WERDEN?

- > Ja, mit dem QinFlow Warrior können auch Blutprodukte schnell und schonend erwärmt werden.
- 

### KANN DER QINFLOW WARRIOR AN EINEM INFUSIONSSTÄNDER ODER EINER PERFUSORENLEISTE MONTIERT WERDEN?

- > Ja, mit der optional erhältlichen Pole Mounting Unit kann der QinFlow Warrior sowohl an einem Infusionsständer als auch an einer Perfusorenleiste sicher montiert werden.

---

### KANN DER QINFLOW WARRIOR MIT NETZSTROM BETRIEBEN WERDEN?

- > Ja, allerdings NUR, wenn er über die optional erhältliche A/C-Einheit an das Stromnetz angeschlossen wird.

---

### KANN DIE FLUSSRATE MIT DEM QINFLOW WARRIOR ANGEZEIGT ODER GESTEUERT WERDEN?

- > Nein, der QinFlow Warrior ist ein Durchlaufsystem zur Erwärmung von Flüssigkeiten. Die Anzeige oder die Steuerung der Flussrate sind mit aktuellen QinFlow Warrior Modellen nicht möglich.

---

### WELCHE QINFLOW WARRIOR MODELLE SIND VERFÜGBAR?

- > Der klassische QinFlow Warrior, der QinFlow Warrior Lite und der QinFlow Warrior Hybrid (in Österreich und in Deutschland in Kürze erhältlich).
- 

---

#### MEDICAL SALES CONSULTANTS AUSTRIA GMBH

Wachaustrasse 13, 3123 Neustift, Austria  
T: +43 2786 631 38, E-Mail: info@medicalsca.at  
Web: www.medicalsca.at

---

#### MEDICAL SALES CONSULTANTS GERMANY GMBH

Vor dem Schonekindtor 13, 59494 Soest, Germany  
T: +49 2921 969 78 50, E-Mail: info@medicalsca.de  
Web: www.medicalsca.de

---

# DIE AM HÄUFIGSTEN AUFTRETENDEN FRAGEN

## FAQ QINFLOW (QIF™) WARRIOR

---

### WAS PASSIERT MIT DEM QINFLOW WARRIOR BEI DER PATIENTENÜBERGABE IM SCHOCKRAUM? KANN DER QINFLOW WARRIOR SCHNITTSTELLEN-ÜBERGREIFEND VERWENDET WERDEN?

- > Idealtypisch verfügt der übernehmende Schockraum über das QinFlow Warrior System. In diesem Fall wird rein die IV-Einmaleinheit an den QinFlow Warrior des Schockraumteams angeschlossen und es können weiter Flüssigkeiten und Blutprodukte erwärmt verabreicht werden. Verfügt der übernehmende Schockraum über kein QinFlow Warrior System, kann der QinFlow Warrior je nach vereinbarter Vorgangsweise entfernt oder auch weiter betrieben werden.

---

### WIE ERKENNE ICH EINEN FEHLER ODER EINE SYSTEMSTÖRUNG BEI DER ERWÄRMUNG?

- > Das Gerät wird einen akustischen Warnton abgeben und eine Fehlermeldung anzeigen.

---

### MUSS ICH DIE INFUSION/TRANSFUSION STOPPEN, WÄHREND DER AKKU GEWECHSELT WIRD?

- > Es ist nicht notwendig, während des Akkuwechsels die Flüssigkeit zu stoppen. Sie wird allerdings während dieser Zeit nicht erwärmt.

---

### WO KANN DIE IV-EINWEGEINHEIT WÄHREND DER VERWENDUNG PLATZIERT WERDEN?

- > Die ringförmige IV-Einwegeinheit kann während der Verwendung entweder direkt auf den QinFlow Warrior gesteckt oder in der Nähe des Patienten platziert werden.

### WIE REINIGE ICH DIE EINHEIT?

#### REINIGUNG DER EINWEGEINHEIT/ KOMPAKT-EINWEGEINHEIT

- > Die Einwegeinheit/Kompakt-Einwegeinheit des Warrior wird steril und einsatzbereit geliefert.
- > Wenn während der Verwendung eine Reinigung erforderlich wird, wischen Sie die Oberflächen der Einheit mit Wasser oder Alkohol (Isopropanol/Ethanol) mit einem feuchten Tuch ab.
- > Die Einwegeinheit/Kompakt-Einwegeinheit des Warrior ist nur für die Verwendung an einem einzigen Patienten vorgesehen. Nicht wiederverwenden!
- > Die Einwegeinheit/Kompakt-Einwegeinheit des Warrior nicht untertauchen, sterilisieren oder autoklavieren.

---

### WIE WIRD DER QINFLOW WARRIOR AUFBEREITET?

- > Basiseinheit und Akku des QinFlow Warrior werden nach jedem Einsatz mittels Wischdesinfektion mit Deconex® SOLARSEPT-Lösung (Borer Chemie AG) oder einem vergleichbaren Desinfektionsmittel aufbereitet.
- > Achtung: Sowohl die Basiseinheit als auch der Akku dürfen nicht sterilisiert, nicht autoklaviert und nicht in Desinfektionslösung eingelegt werden.